


Recogida de muestra oral con hisopo

Es **MUY IMPORTANTE** que antes de realizar la recogida de muestra no beba, ni coma, ni fume al menos durante una hora antes de la realización de la prueba.

Material necesario para la recogida de las muestras.

- 2 hisopos con el extremo de algodón por participante.
- 1 sobre de papel por participante para guardar los hisopos, y un sobre más grande para preparar el paquete con todas las muestras en sobres de papel para su envío al laboratorio.
- 1 formulario de solicitud.

Los hisopos que deberá comprar tienen que ser de algodón, y estar totalmente estériles. Puede comprar los hisopos en una farmacia o en nuestro centro **ADN Institut**.

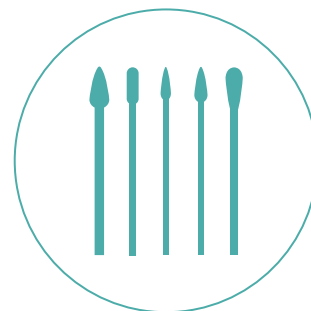

IMPORTANTE: No servirá la utilización de bastoncillos bilaterales.

Debe disponer de tantos sobres de papel como participantes haya en la prueba. En cada sobre deberá escribir un nombre y un identificador (por ejemplo, el sobre destinado a recoger las muestras del supuesto padre tendrá escrito "Padre (nombre del padre)")

Procedimiento de recogida de la muestra.

La muestra a recoger se realizará con 2 hisopos, 1 por cada mejilla.

PASO 1

Lávese las manos para extremar las precauciones y evitar contaminar el hisopo. Al abrir el sobre o envoltorio que contengan los hisopos se debe extremar las precauciones, ya que se tiene que evitar que el algodón entre en contacto con superficies u objetos.



PASO 2

Con el primer hisopo recoja muestra de la mejilla derecha: frote firmemente (pero no de manera agresiva) la mejilla 30 veces o durante 1 minuto.


Repita este procedimiento con el otro hisopo en la mejilla izquierda. Evite tocar el algodón con la encía o los dientes para no contaminar la muestra.



PASO 3

Antes de poner los hisopos en el sobre correspondiente, deje secar el algodón durante una hora. NUNCA toque el algodón.

Debe dejarlos secar apoyados en algún lugar en el cual el extremo del algodón quede mirando hacia arriba sin tocar nada.

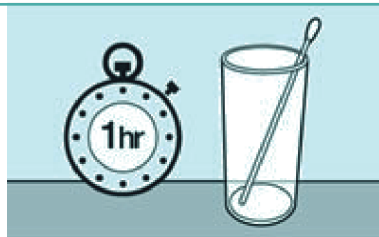

PASO 4

Una vez secos ponga los hisopos directamente dentro del sobre de papel, sin envoltorio de plástico y evitando que el extremo del hisopo (algodón) entre en contacto con cualquier superficie que no sea el sobre de papel. NO toque el algodón para comprobar que esté seco. Cierre el sobre, en el cual sólo debe haber los hisopos dentro.



PASO 5

Rellene y firme el formulario de solicitud.

Una vez que lo tenga relleno, debe poner el formulario firmado juntamente con los sobres con los hisopos, dentro de otro sobre más grande, y cerrarlo.

Tras realizar el paso 5 debe ponerse en contacto con nuestro centro, y nosotros nos encargaremos de concertar la recogida de la muestra con el mensajero.



Cuando tenga a punto las muestras y el formulario relleno contáctenos por una de las siguientes vías, especificando, horario, día, y dirección de recogida:

Email: atencio@adninstitut.com

Teléfono: 93 115 99 50

WhatsApp: 647920216